

## Mund- Nasenschutzmasken (FFP2 und FFP3)

gültig ab: 1.3.2010

Version 02


Seite 2 von 3

## 4 TÄTIGKEITSBESCHREIBUNG

## 4.1. Maskenmodelle



Patienten: ohne Expirationsventil  
Personal: mit Expirationsventil

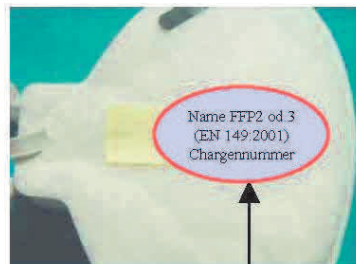

Produktionsspezifikation



Patient

Personal

## 4.2. Anlegen der Schutzmaske



Schritt 1



Schritt 2



Schritt 3



Schritt 4



Schritt 5

Mit den Fingerspitzen beider Hände den Metallbügel der Maske vom Nasenrücken abwärts zu den Wangen an die Konturen des Gesichts anmodulieren. Den Bügel nur zu quetschen sorgt nicht für einen sicheren und dichten Schutz der Maske!

Kräftig **Ausatmen!** Ein positiver Druck in der Maske muss spürbar sein. Bei Feststellen einer undichten Stelle positionieren Sie die Maske erneut (Haltebänder etc.)  
**Wiederholen Sie den Vorgang bis die Maske dicht sitzt.**

Kräftig **Einatmen!** Wenn die Maske dicht sitzt wird sie an das Gesicht gepresst. Bei einem schlechten Sitz lässt dieser Anpressdruck sofort nach.  
**Wiederholen Sie den Vorgang bis die Maske dicht sitzt.**

## 4.3. Maskenwechsel

- Bei Durchfeuchtung der Maske
- Nach Berührung mit kontaminierten Händen
- Bei sichtbarer Kontamination